

Acetocaustin[®]

Tretman kiselinom

PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTU ZA UPORABU PRIJE KORIŠTENJA ACETOCAUSTIN TRETMANA KISELINOM ZA BRADAVICE, ČAK I AKO STE I PRIJE KORISTILI PROIZVOD. UPUTE SU SE MOŽDA PROMIJENILE TEMELJEM NOVIH ISTRAŽIVANJA OTKAKO STE ZADNJI PUTA OTVORILI PAKIRANJE OVOG PROIZVODA. SAČUVAJTE OVU UPUTU ZA SLUČAJ DA JE TREBAJTE PONOVO PROČITATI. ZA ODRAŠLE I DJECU (STARIJU OD 4 GODINE).

ZA ŠTO SE KORISTI ACETOCAUSTIN TRETMAN KISELINOM ZA BRADAVICE?

Acetocaustin tretman kiselinom za bradavice je medicinski proizvod namijenjen liječenju običnih bradavica. Acetocaustin tretman kiselinom za bradavice sadrži monokloroctenu kiselinu, tvar koja ima keratolitički učinak na kožu. Bradavica će se otopiti, sloj po sloj. Monokloroctena kiselina osigurava da se unište stanice koje sadrže virus bradavica.

Korist primjene Acetocaustin tretmana kiselinom za bradavice leži u tome što direktna primjena na bradavice ne boli, zbog čega se uz pravilnu primjenu može primijeniti i djeci od strane odrasle osobe.

Acetocaustin tretman kiselinom za bradavice se može koristiti samo na običnim bradavicama:

- Prvenstveno se pojavljuju na dlanovima i stopalima
- Iste su boje kao koža
- Opseg se razlikuje od manje od milimetra do više od centimetra
- Uglavnom se istovremeno pojavljuje više bradavica
- Do zaraze često dolazi izravnim dodirima, ali i putem ručnika i zaraženih površina
- Grebanje i grickanje noktiju povećava rizik zaraze



Nemojte koristiti Acetocaustin tretman kiselinom za bradavice na staračkim bradavicama

- Mogu biti različitih veličina i boja
- Prosječni opseg je 0,5 do 1 cm
- Često su u početku mrlje boje kože, žućkastosmeđe ili sivkasto smeđe. Kasnije postaju veće i deblje
- Izgledaju kao da leže na površini kože i kao da ih je lako sastrugati, no zapravo su čvrsto pričvršćene za kožu
- Mogu se pojaviti bilo gdje na tijelu, osim dlanova i tabana stopala te usnama. Najčešće se pojavljuju na prsima, leđima, licu i vratu



Upute za primjenu (spriječite opekline):

DA:

- Primjena od strane odraslih osoba;
- Koristite samo na dlanovima i stopalima! Ne koristiti na ostalim dijelovima tijela;
- Primijenite vazelin ili cinkovu pastu na okolnu kožu kako biste je zaštitili;
- Postavite bočicu na čvrstu podlogu koja je otporna na nagrizajuću tekućinu;
- Nanesite na bradavicu samo jednom kod primjene;
- Nanesite na bradavicu samo jednom tjedno;
- Dopustite tekućini da dođe u kontakt samo s bradavicom;
- Izbjegavajte doticaj s kožom;
- Pustite da se tekućina dobro osuši nakon primjene;
- Ostavite bradavicu bez pokrivanja;
- Rezultat je vidljiv nakon 1 tjedna;
- Čuvajte izvan dosega djece.



NE:

- Osobe mlađe od 18 godina ne smiju same nanositi proizvod;
- Nanositi na bradavice na bilo kojem dijelu tijela osim dlanova i stopala;
- Nanositi na bilo kakve bradavice koje su u cijelosti ili djelomično ispod noktja;
- Dopustiti tekućini da dođe u kontakt sa zdravom kožom;
- Primjenjivati ako vam se ruke tresu ili su prsti ukočeni;
- Nanositi na bradavicu više puta tijekom jedne primjene;
- Prekrivati bradavicu nakon primjene tekućine;
- Nanositi na madeže, žuljeve, otvorene rane, hiperpigmentacije, senilne bradavice, tamne, dlakave ili neobične bradavice;
- Koristiti tijekom trudnoće i dojenja;
- Ponavljati primjenu bez razmaka od tjedan dana.



⚠ OPREZ

Nemojte koristiti Acetocaustin tretman kiselinom za bradavice:

- U djece mlađe od 4 godine
- Ako ste osjetljivi na jedan ili više sastojaka ili na licu (tekućina nikad ne smije doći u kontakt s očima ili sluznicom nosa ili usta)
- Za genitalne bradavice i u genitalnom području
- Na madežima od rođenja, moluskama, otvorenim ranama, madežima, nevusima, staračkim (smeđim) bradavicama, tamnim, dlakavim ili neobičnim bradavicama
- Na crvenim, nadraženim ili inficiranim bradavicama
- Odmah nakon kirurškog uklanjanja bradavica, zamrzavanja (krioterapije) ili tretmana laserom. To je osobito važno ako je koža crvena ili bolna nakon tih tretmana. U tom slučaju morate čekati najmanje 4 tjedna, dok se crvenilo ili upala kože u potpunosti ne povuče. Tek tada možete početi ponovno koristiti Acetocaustin tretman kiselinom za bradavice
- Tijekom trudnoće ili dojenja
- Na bradavice koje su u cijelosti ili djelomično ispod noktja
- Kapati na bradavicu više od jednom i ponovno primijenite tek nakon pauze od tjedan dana, ako je potrebno.

Budite posebno oprezni kad koristite Acetocaustin tretman kiselinom za bradavice:

- U slučaju sumnje oko dijagnoze (ako se promjena na koži ne može jasno objasniti kao bradavica)
- U slučaju imunodeficijencije (npr. ako koristite citostatske lijekove)
- U slučaju dijabetesa ili drugih problema poput bolesti krvnih žila, zbog kojih rane teže zacjeljuju.

U tim slučajevima, ne smijete koristiti Acetocaustin tretman kiselinom za bradavice prije savjetovanja s liječnikom

⚠ UPOZORENJA

- Samo za vanjsku primjenu
- Koristite s najvećom pažnjom. Tekućina u Acetocaustin tretmanu kiselinom za bradavice je nagrizajuća
- Ako zdrava koža dođe u kontakt s tekućinom, molimo isperite je vodom. Ako unatoč mjerama opreza koža postane nadražena, morat će proći kroz isti tretman kao opekline
- Ukoliko se problemi ne povuku, obratite se svom liječniku
- Dobro zatvorite bočicu nakon uporabe i čuvajte je u ispravnom položaju
- Čuvajte izvan dosega male djece
- Primjena u djece, starijih i manje sposobnih mora biti pod nadzorom odrasle osobe.
- Izbjegavajte kontakt s odjećom, tekstilom i kožom
- Prestanite koristiti ako se pojave mjehurići
- Kapnite na bradavicu samo jednom i ponovno primijenite, ako je potrebno, tek nakon pauze od tjedan dana

NUSPOJAVE

Acetocaustin tretman kiselinom za bradavice može uzrokovati nuspojave, iako se one neće pojaviti kod svakoga. Nuspojave koje se mogu pojaviti su nadražena koža, osjećaj peckanja, crvenilo kože i reakcije preosjetljivosti. Ako bilo koja od ovih nuspojava postane ozbiljnija ili ako primijetite bilo kakvu nusjavu koja nije navedena u ovoj uputi, molimo obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

INTERAKCIJE S LIJEKOVIMA

Do sada nisu poznate interakcije s bilo kakvim lijekovima.

SADRŽAJ ACETOCAUSTIN TRETMANA KISELINOM ZA BRADAVICE

Bočica s 2 ml mješavine monokloroctene kiseline (50%) i pročišćene vode (50%). Prilagođeni aplikator se koristi za primjenu formulacije na bradavicu.

UVJETI ČUVANJA

Čuvajte Acetocaustin tretman kiselinom za bradavice na temperaturi 15-25°C na suhom i mračnom mjestu, u originalnom pakiranju i van dosega male djece.

⚠ Rok valjanosti je naveden na dnu pakiranja. Nakon otvaranja, nemojte koristiti duže od 4 tjedna.

Za više informacija o Acetocaustin tretmanu kiselinom za bradavice posjetite www.acetocaustin.com. Za više pitanja o proizvodu, molimo obratite se distributeru.

MEDICINSKI PROIZVOD:

Acetocaustin tretman kiselinom za bradavice je medicinski proizvod klase IIa prema Direktivi 93/42/EEC.

OBJAŠNJENJE SIMBOLA

Znakovi i simboli upozorenja na pakiranju i uputama za primjenu su nužni kako biste proizvod koristili na siguran i pravilan način i kako bi se Vi i ostali zaštitili od ozljeda. Simboli su objašnjeni u tablici niže:

Simbol	Objašnjenje
	Simbol za proizvođača
	Simbol koji ističe da treba pročitati upute za primjenu
	Simbol koji ističe da je potreban oprez kod rukovanja proizvodom
	Simbol za datum isteka roka valjanosti
	Simbol koji ističe da je predmet medicinski proizvod
	Upozorenje: nagrizajuća tvar
	Nije za djecu u dobi od 3 godine i manje
	Čuvati izvan dosega djece
	Nije za trudnice ni dojilje
	Simbol za broj serije
	Proizvod treba čuvati između 15 °C i 25 °C


KAKO KORISTITI ACETOCAUSTIN TRETMAN KISELINOM ZA BRADAVICE (PRIMJENA SAMO OD STRANE ODRASLIH):

Molimo primijenite Acetocaustin tretman kiselinom za bradavice s najvećom pažnjom. Otopina je nagrizajuća. Budite posebno oprezni kad je primjenjujete na dijelove dlanova ili stopala koje je teže doći. To se posebno odnosi na osobe s ograničenom pokretljivošću ili ako je oštećena fina motorika (drhtanje ruku, ukočeni prsti).



1. Acetocaustin tretman kiselinom za bradavice ima otvarač sa zaštitom za djecu koji se otvara kako slijedi: Postavite bočicu na čvrstu podlogu koja je otporna na nagrizajuću tekućinu. Izbjegavajte kontakt s odjećom i tekstilom. Bočicu možete otvoriti tako da pritisnete čep prema dolje i istovremeno ga okrenete obrnuto od kazaljke na satu.
2. Prije potpunog uklanjanja čepa s bočice, obilno nanesite vazelin ili cinkovu pastu na zdravu kožu koja okružuje bradavicu.
3. Uklonite čep s bočice.
4. Potom primijenite malu količinu Acetocaustin tretmana kiselinom za bradavice na bradavicu koristeći špatulu (spriječite kapanje tekućine). Osigurajte da Acetocaustin tretman kiselinom za bradavice primijenite samo na bradavicu i nemojte kapati na bradavicu više od jednom.
5. Dopustite da se osuši i nemojte pokrivati bradavicu. Pažljivo zatvorite bočicu nakon primjene. Acetocaustin tretman kiselinom za bradavice se ne smije primjenjivati više od jednom tjedno.

Tekućini treba tjedan dana da otopi gornji sloj bradavice pa se rezultat ne može vidjeti odmah nakon primjene. Ovisno o veličini i debljini bradavice, možda treba ponoviti primjenu Acetocaustin tretmana kiselinom za bradavice nakon tjedan dana. Nemojte ponavljati primjenu bez pauze od tjedan dana.

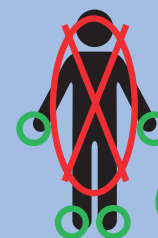

Primijeniti samo na obične bradavice i stopalima

4+ DOB PRIMJENA SAMO



OPREZ: SPRIJEČITE OPEKLINE: PROČITAJTE UPUTU ZA UPORABU PRIJE PRIMJENE!

PROIZVOĐAČ
PK Benelux B.V.
Vluchttoord 17
5406 XP Uden
Nizozemska

DISTRIBUTER
TheOTClab
Fred.Roeskestraat 115
1076 EE Amsterdam
The Netherlands